

Схема присоединения 1

колонок «Гемос-КС», «Гемос-ДС» («Десепта») к диализным (большим) магистралям

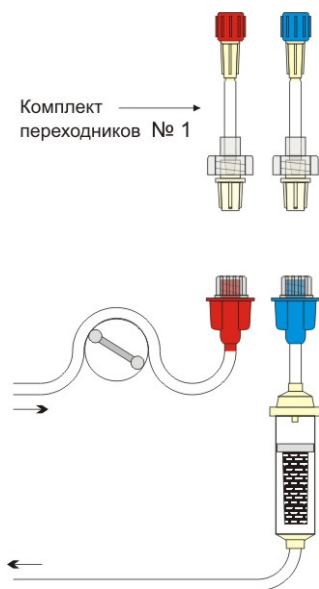


Рис. 1

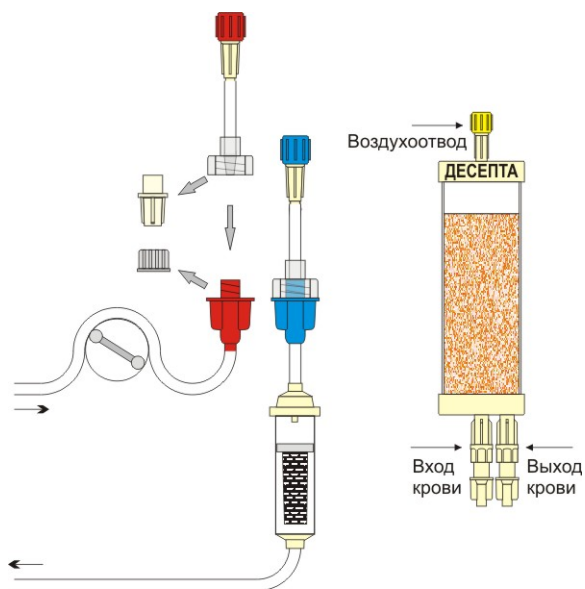


Рис. 2

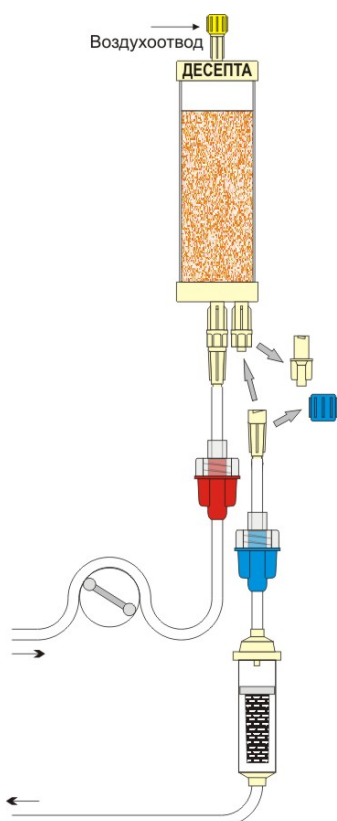


Рис. 3

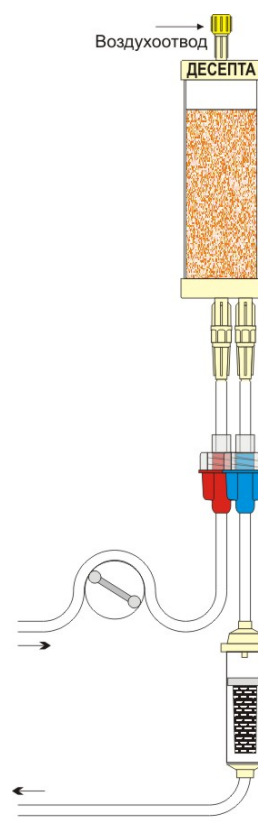


Рис. 4

Порядок присоединения.

Рис. 2.

- снять колпачки с одной стороны комплекта переходников 1 и с коннекторов артериальной и венозной диализной магистрали,
- соединить коннекторы переходников с коннекторами диализной магистрали.

Рис. 3.

- снять колпачок с другой стороны комплекта переходников 1 и с центрального коннектора колонки,
- соединить коннектор переходника с центральным коннектором колонки,
- снять колпачок с другой стороны второго переходника и с бокового коннектора колонки,
- соединить коннектор второго переходника с боковым коннектором колонки.

Рис. 4.

- колонка присоединена к диализной магистрали.



® Разработчик, изготовитель и поставщик: НПП «Биотех-М».

Адрес в интернете: <http://www.gemos.ru>, e-mail: gemospf@gmail.com

Адрес: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 5. тел/факс: (495) 758-6522, 750-0847

Схема присоединения 1

плазмофильтра «Гемос-ПФС» к диализным (большим) магистралям

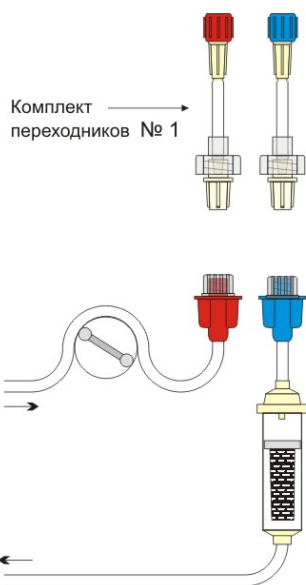


Рис. 1

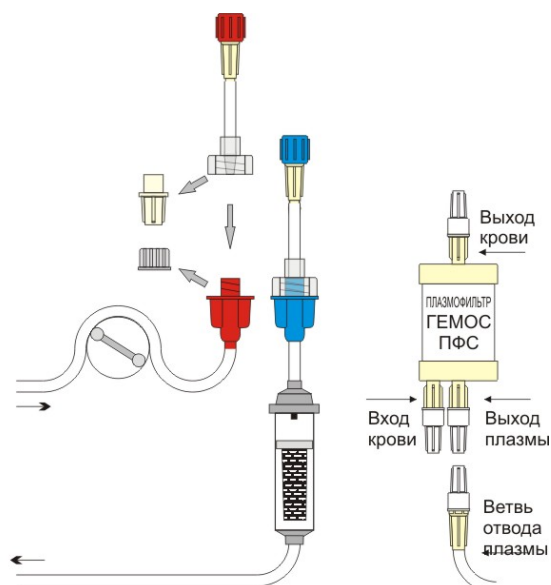


Рис. 2

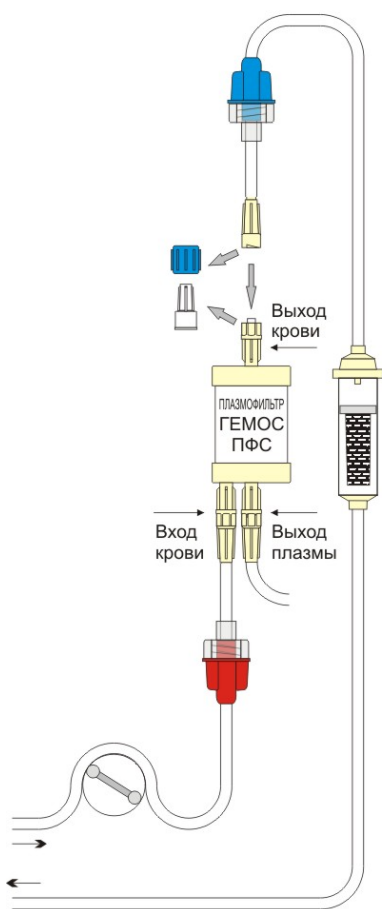


Рис. 3

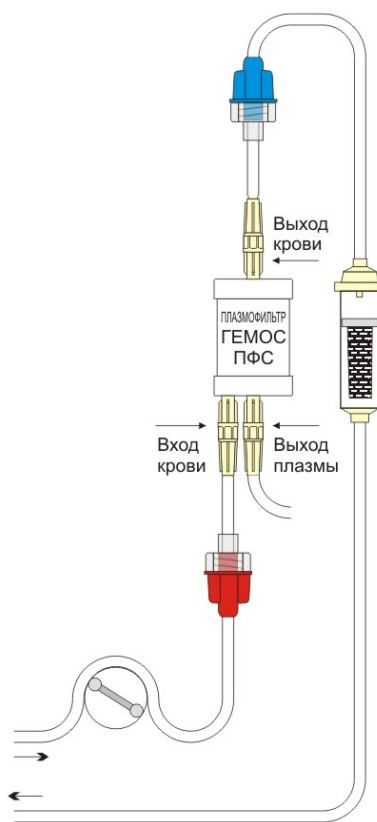


Рис. 4